

Línea ECAMlux

MODELO DE PANTALLA

Ø 320 mm

Ø 170 mm

Timer (opcional)

OPCIONES DE SOPORTE

Soporte Rodante


Soporte de Mesa Base Pesada

Soporte de Mesa Económico

Las lámparas están construidas con estructura de acero cromada y portalámparas de porcelana resistente a la alta temperatura, pudiendo utilizarse bulbos de rayos ultravioletas, infrarrojos o de luz de espectro visible.

Su diseño es sólido, confiable por su estabilidad y liviano para un fácil traslado.

Lámpara de pie rodante

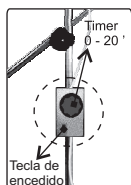

OPCIONAL



Tecla de encendido

Brazo articulado

Pantalla Ø 320 mm.

Pantalla Ø 170 mm.

Estructura cromada

Base de 5 Ruedas con doble pista

Pantalla Ø 170 mm.

Lámpara de mesa económica

Pantalla Ø 320 mm.

Lámpara de mesa Base Pesada

LÁMPARA DE PIE RODANTE:

Pantalla de Ø 320 mm peso aprox. de 2,9 kg ó Ø 170 mm peso aprox. de 2,2 kg con brazo articulado y movimiento universal, altura regulable de 0 a 1,80 m y base de 5 ruedas con doble pista.

Opcional con timer (0-20') para ajustar el tiempo de funcionamiento.

LÁMPARA DE MESA:

Soporte Base Pesada: provisto con pantalla de Ø 170 mm peso aprox. de 2,0 kg ó Ø 320 mm peso aprox. de 2,8 kg. Estructura de acero cromada.

Soporte Económico: provisto con pantalla móvil de Ø 170 mm peso aprox. de 0,8 kg. estructura de acero cromada.

PRECAUCIONES DE USO:

- No sumergir el artefacto en agua.
- No tocar el artefacto con la manos húmedas o mojadas.
- No dejar el artefacto expuesto a agentes atmosféricos.
- Mientras este encendido evite su manipuleo desde la pantalla.
- Antes de conectar el artefacto asegúrese que los datos de alimentación concuerden con los de la red eléctrica.
- Antes de realizar cualquier mantenimiento u operación de limpieza, desconectar el artefacto de la red eléctrica.
- No tirar del cable de alimentación del artefacto.
- Para cualquier reparación dirigirse sólo a un servicio técnico autorizado por el fabricante. www.accme.com.ar


INSTRUCCIONES DE USO:

Conectar la lampara a la red de alimentación eléctrica y luego presionar la tecla de encendido hacia la posición "I"(conectado).

USO DEL TEMPORIZADOR

Si su lámpara está equipada con timer debe seleccionar el tiempo de funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Alimentación: 220V. ~ / 50Hz.
- Clase I  (Toma de tierra).
- Rosca Portalámpara: E27.